
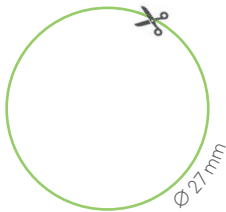
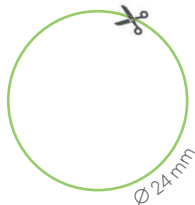


WELCHE GRÖSSE PASST?

FÜR ARDO HANDS-FREE PUMPSETS

Die Brustglocke passt wenn:

- rund um die Brustwarze ca. 2 mm Platz frei bleibt
- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann.
- sich kein Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet.
- die Milch fließt und sich die Brust nach dem Abpumpen überall weich anfühlt.

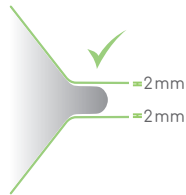

Bitte diese Vorlage im Druckermenü mit
100 % Größe ausdrucken