

ardo sns

BRUSTERNÄHRUNGSSET



WT0022 / 09/2025 V02

Bedarfsgerechte Zufütterung direkt an der Brust

Ardo SNS (Supplemental Nursing System), unser **Brüsternährungsset**, ist ein spezielles Hilfsmittel für stillende Mütter, das die bedarfsgerechte Zufütterung von Muttermilch oder ergänzender Nahrung direkt an der Brust ermöglicht. Es unterstützt das natürliche Stillen und die Milchbildung bei besonderen Herausforderungen, unter anderem:

- Frühgeburt oder Saugschwierigkeiten
- Geringe Milchbildung oder Relaktation
- Unzureichende Gewichtszunahme des Babys
- Besondere Situationen wie Adoption oder medizinische Eingriffe

Ziel: Das Baby aktiv an der Brust zu füttern, die Stillbeziehung zu erhalten und die Milchproduktion zu fördern.

Die Vorteile des Ardo Brüsternährungssets

Wir haben das Brüsternährungsset nicht neu erfunden – aber die Bedürfnisse der Anwenderin und die Unterstützung einer gelingenden Stillbeziehung in den Mittelpunkt gestellt.

- **Doppelt praktisch:** Zwei Schläuche ermöglichen das abwechselnde Stillen an beiden Brüsten – ohne Unterbrechung zum Umkleben.
- **Individuell anpassbar:** Ein verstellbares Umhängeband macht die Regulierung des Milchflusses besonders einfach.
- **Hygienisch & flexibel:** Zwei zusätzliche Schlauchsets erleichtern den Wechsel – so können frisch gereinigte Schläuche in Ruhe trocknen.
- **Leicht zu reinigen:** Die flexible Milchflasche lässt sich durch einfaches Zusammendrücken schnell und effektiv durchspülen.
- **Komfortabel:** Der flache Milchbehälter liegt stabil auf der Brust, ohne störendes Verrutschen.
- **Nachhaltig:** Langlebige, hochwertige Materialien für eine verlässliche und ressourcenschonende Nutzung.

Funktionsweise des Ardo SNS

Naturnahes Füttern:

Das Baby saugt an der Brust und erhält gleichzeitig zusätzliche Milch über feine Schläuche, die an der Brustwarze angebracht sind. So bleibt der Saugvorgang an der Brust erhalten und das Baby wird durch Belohnung mit Milch zum Saugen motiviert.

Bedarfsgerecht:

Das Kind bestimmt die Trinkmenge selbst, indem es aktiv saugt – genau nach seinem individuellen Bedarf.

Individuell steuerbar:

Die Anwenderin kann Milchfluss und -menge gezielt regulieren:


- **Zeitpunkt des Milchflusses:** durch früheres oder späteres Öffnen des Schlauches.
- **Geschwindigkeit der Milchmenge:** durch die Position der Flasche (höher = schneller, zwischen den Brüsten = langsamer).
- **Saugintensität:** durch einen zweiten Schlauch, der den Unterdruck beeinflusst (offen = leichteres Saugen, eingeklemmt = stärkeres Saugen notwendig).

So lässt sich das Ardo SNS flexibel an verschiedene Situationen und Stillziele anpassen.

Vorteile in der Stillberatung

- Stillfreundliche Zufütterung, die die Stillbeziehung fördert
- Stimulation der Brust zur Anregung der Milchbildung
- Bedarfsgerechte Milchaufnahme direkt an der Brust
- Motiviert zum Saugen und Trainiert die natürlichen Saugbewegungen
- Fördert intensiven Hautkontakt und emotionale Nähe zwischen Mutter und Baby
- Einsetzbar auch von nicht-laktierenden Elternteilen oder Adoptiveltern

Das Ardo Brusternährungsset besteht aus den folgenden Einzelteilen:

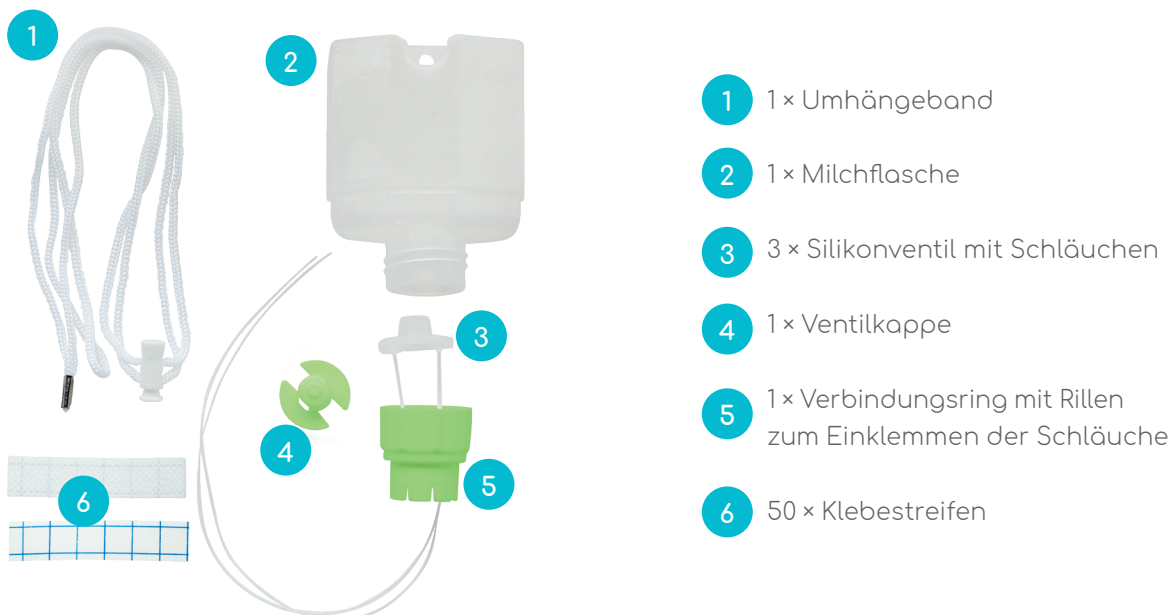

Das Ardo Brusternährungsset (SNS) ist eine flexible, hygienische und stillfreundliche Lösung, um Mütter bei der sanften, bedarfsgerechten Zufütterung zu unterstützen. Es verbindet praktische Anwendung mit Bindungsförderung und Unterstützung der Milchproduktion.